




SEDACÍ VAK BEANSEAT STABILO SYSTÉM

NÁVOD K POUŽITÍ

NOEL s.c.

ul. Kołodziejska 1
30-607 Kraków
Poland

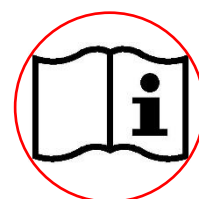

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Společnost NOEL navrhla a vyrobila SEDACÍ VAK BEANSEAT STABILO SYSTÉM s důrazem na nejvyšší bezpečnostní a funkční požadavky. Jsme přesvědčeni, že náš produkt splní vaše požadavky a očekávání. Tento návod k použití je nedílnou součástí SEDACÍHO VAKU BEANSEAT STABILO SYSTÉM.

Před použitím výrobku pečlivě přečtěte návod k použití.

Vakuový polohovací systém stabilizující trup, hlavu a končetiny SEDACÍ VAK BEANSEAT STABILO SYSTÉM

Produkt je určen pro děti a dospělé s mozkovou obrnou, kompenzuje a zmírňuje postižení tím, že stabilizuje pacienta v pozici vsedě nebo vleže.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

SEDACÍ VAK BEANSEAT STABILO SYSTÉM lze použít pro:

- zmírnění účinků dlouhodobého setrvávání v jedné pozici (např. kontraktur)
- stabilizaci pacienta se svalovou slabostí

BEZPEČNOST VÝROBKU UPOZORNĚNÍ

- Dlouhé setrvávání pacienta v jedné poloze může vést k proleženinám.
- Doporučujeme používání vzdušného potahu v případě zvýšené potřeby odvětrávání okolo těla.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit matraci.
- Nečistěte pomocí čisticích prostředků založených na rozpouštědlech, např. toluen nebo aceton.
- Netahejte za ventil.
- Nepřefukujte vak.
- Při nafukování používejte pouze speciální kompresor, který je dodáván s vakem.
- Nežehlit.
- V případě poškození mohou unikát mikro-granuly, které mohou být nebezpečné pro malé děti.
- Pístroj smí používat pouze osoby, které obdržely pokyny nebo školení.

POZOR

- Tloušťka sedáku se při počátečním používání může přirozeně snížit o 5 %.
- V případě značných změn teploty použijte znovu kompresor, abyste dosáhli správné tvrdosti (vyšší teplota změkčuje sedadlo, nižší teplota zpevňuje sedadlo).

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO KOMPRESORU

1. Vyjměte hadici z krabice s elektrickým kompresorem.
2. Odšroubujte krytku ventilu, našroubujte hadici (závitovou část) do ventilu vaku a zatlačte druhou hadici do **SOFT** zásuvky na elektrickém kompresoru. Zapněte kompresor a počkejte, až bude vak dostatečně měkký a kompresor vypněte.
3. Natvarujte vak (buď ručně nebo posazením/opřením se o něj).
4. Změňte pozici hadice ze zásuvky **SOFT** do **HARD** a zapněte kompresor pro odsání vzduchu, dokud nedosáhnete požadované tvrdosti.
5. Odšroubujte hadici, znovu nasadte krytku a utáhněte ji.



ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte stav produktu - věnujte pozornost případným prasklinám a trhlinám.
- Před praním nasadte na ventil krytku.
- Lze prát ručně pod tekoucí vodou pomocí standardního čisticího prostředku, např. pracího gelu.
- Vhodné pro praní v pračce při 40 °C - postačuje aviváž, není třeba použití pracího prášku.
- Osušte papírovou utěrkou.
- Je možné použít standardní dezinfekční prostředky používané v nemocnicích.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, jako je toluen nebo aceton.

ZÁRUKA

- Záruka je poskytována po dobu **24 měsíců**
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození SEDACÍHO VAKU BEANSEAT STABILO SYSTÉM
- V případě pochybností, prosím, kontaktujte prodejce nebo přímo výrobce
- Oznamte případné události prodejci nebo přímo výrobcí

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SEDACÍ VAK BEANSEAT STABILO SYSTÉM je zdravotnický prostředek, který splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS.

DODAVATEL



PRAHA

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8

tel./fax: 266 313 652

ortoservis@ortoservis.cz

BRNO

Minská 100, 616 00 Brno - Žabovřesky

tel./fax: 541 240 393

brno@ortoservis.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice

tel./fax: 387 432 502

cb@ortoservis.cz

OPAVA

Pivovarská 7/71, 746 01 Opava

tel./fax: 553 775 226

opava@ortoservis.cz

www.ortoservis.cz

Společnost Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014, IČO 26121760

VÝROBCE

NOEL s.c.
ul. Kołodziejska 1
30-607 Kraków
Poland

