

ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11

Pivovarská 7/71, 746 01 Opava, tel/fax: 553 775 226

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice, tel/fax: 387 432 502

Minská 100, 616 00 Brno, tel/fax: 541 240 393



Návod k použití

SAMOSTOJNÉ HRAZDY S MADLEM



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EWG
pro zdravotnické výrobky

Účel použití

Tato samostojná hrazda je určena jako pomůcka pro osoby se sníženou pohyblivostí. Má jim usnadnit pohyb na lůžku včetně usnadnění vstávání z něj a usnadnit vstávání ze sedacího nábytku (židle, křeslo, pohovka). Je konstruována tak, aby nemusela být u lůžka či nábytku jakkoliv připevněna.

Technický popis

Nosná konstrukce sestává ze dvou částí. Dolní, základová část je tvořena ocelovou trubkou ve tvaru šířěji rozevřeného písmene U, která leží na podlaze. Ve středu této části, kolmo k podlaze je pak navařena svislá část, sloužící k upevnění horní části konstrukce. Oba konce vodorovné části trubky jsou osazeny umělohmotnou záslepkou. Horní část konstrukce je tvořena ocelovou trubkou ve tvaru lomeného písmene L. Tato část je pak osazena do svislé trubky dolní části konstrukce. Její poloha je vymezena zde osazeným silonovým pouzdrům a čepem. Vodorovný konec horní části nosné konstrukce je zaslepen speciálním náplekem, sloužícím zároveň jako aretační prvek pro textilní závěs umělohmotného trojúhelníkového madla. Povrchová úprava všech kovových částí konstrukce je provedena nástřikem metalickým lakem.

Nosnost hrazdy je 120 kg.

Montáž hrazdy

Hrazda je dodávána ve třech dílech. Spodní část, horní část a závěs s madlem. Jednotlivé části jsou zabaleny v ochranné folii. Montáž hrazdy je účelné provádět v bezprostředním okolí místa jejího budoucího užívání. Při montáži hrazdy postupujte následovně:

- Vybalte všechny části z ochranné folie.
- Položte spodní část nosné konstrukce na podlahu tak, aby aretační trubka směřovala vzhůru.
- Zasuňte delší konec horní části nosné konstrukce do svislé trubky spodní části.

- Otáčejte horní částí konstrukce kolem osy tak, aby se místo pro zavěšení madla dostalo nad střed dolní části konstrukce. Po poklesnutí horní části doprovázeném kovovým cvaknutím a dle toho, že horní část se již ve spodní části konstrukce nemůže otáčet, lze konstatovat, že obě části jsou správně sestaveny. Přesto se před další montáží přesvědčte, že místo pro zavěšení madla je umístěno nad středem dolní části konstrukce.
- Zavěšte textilní popruh s trojúhelníkovým umělohmotným madlem výřezem v horní části koncové záslepky horní části konstrukce tak, jak je patrné z fotografie na titulní straně návodu.
- Upravte délku textilního popruhu trojúhelníkového madla na délku odpovídající danému účelu použití a přesvědčte se, že textilní popruh je svojí přezkou řádně zajištěn.

Hrazda nesmí být používána, pokud závěs madla hrazdy není situován nad středem spodní části hrazdy, nebo pokud se horní díl konstrukce může ve spodním dílu konstrukce otáčet. V opačném případě hrozí zranění uživatele.

Umístění hrazdy

Hrazda musí být vždy umístěna na rovném, vodorovném povrchu, prostém jakýchkoliv výstupků či nerovností. Správnost umístění ověříte vizuálně tak, že zkontrolujete svislost svislé části hrazdy ve dvou na sebe kolmých směrech. Hrazda je ve spodní části konstrukce vybavena dvěma otvory, sloužícími pro případné ukotvení konstrukce hrazdy k podlaze. Toto ukotvení však musí sloužit vždy pouze k fixaci polohy hrazdy v místnosti, nikoliv tedy k zajištění její stability. Vhodné kotevní prvky je nutno zvolit v závislosti na technické skladbě podlahy. Před fixací hrazdy k podlaze doporučujeme několikadenním používáním hrazdy ověřit, že tato je vůči lůžku či sedacímu nábytku v optimální poloze.

Způsob používání

Optimální funkce hrazdy je podmíněna jejím správným umístěním vůči lůžku, či vůči sedacímu nábytku, nebo přesněji řečeno, vůči poloze jejich uživatele v nich. Doporučujeme věnovat umístění hrazdy značnou pozornost, protože i několikacentimetrová odchylka od optimální polohy může mít na uživatelský komfort velmi nepříznivý dopad. Hrazda musí být vždy umístěna tak, aby síla, kterou na ni působí její uživatel neporušovala její stabilitu, tedy aby průmět této síly směřoval do prostoru, vymezeného dolní částí konstrukce hrazdy na podlaze.

Údržba, opravy

Hrazda nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Umývat je jí možno dle potřeby vlažnou vodou s běžnými saponátovými čistícími prostředky pro domácnost. Pravidelně, minimálně jedenkrát za půl roku, je nutno konstrukci prohlédnout, zda nedošlo k mechanickému poškození některého dílu. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat kontrole textilního závěsu a umělohmotného trojúhelníkového madla na něm. Hrazda a všechny její části jsou zhotoveny tak, aby jejich životnost byla minimálně 10 let.

Na hrazdu a všechny její části je poskytována záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na závady způsobené konstrukčními či technologickými vadami. Nevztahuje se na závady způsobené jejím užíváním v rozporu s pokyny v návodu k použití, neoprávněným zásahem do konstrukce hrazdy, či neodvratitelnými událostmi.

V případě zjištění jakékoliv závady se obraťte výhradně na kteroukoliv v záhlaví uvedenou adresu firmy Ortoservis, která zajišťuje záruční i pozáruční opravy.

Věříme, že Vám tato pomůcka usnadní řešení Vaší složité životní situace. Vaší pozornosti si dovoluujeme doporučit i řadu dalších pomůcek pro seniory a tělesně postižené z našeho katalogu.